

貼りかえ用

磁気治療器用 絆創膏

48枚入




Daiichi-Sankyo

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10
<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造元
株式会社ニトムズ
東京都品川区東品川4-12-4

【使用方法】

絆創膏中心部分に磁石が肌にあたるようにしっかり貼り付けて、図の順序で使用して下さい。

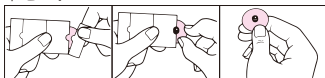

〈使用方法に関連する注意〉 1. 使用される磁気治療器の使用方法に従って使用して下さい。2. 絆創膏を貼りかえて使用できる磁気治療器以外には使用しないで下さい。3. 患部の水分や皮脂をよくふき取ってから使用して下さい。4. 皮膚や絆創膏を引っ張ったり、縮めた状態で貼り付けないで下さい。5. 絆創膏を皮膚に貼るときは、上からしっかりと押さえるようにして下さい。6. 絆創膏を皮膚からはがすときは、絆創膏の端をゆっくり引き上げ、痛みの無いようにはがして下さい。7. 2~3日毎に貼りかえて下さい。



16Z1

MADE IN JAPAN



- ・この絆創膏は、貼りかえて使用できる磁気治療器の貼りかえ用としてのみ使用して下さい。
- ・本品に磁石・ゲルマニウム等は含まれておりません。

注意

1. 次の部位には使用しないで下さい。(1) 顔、粘膜部位 (2) しっしん、かぶれ、傷口等
2. 皮膚の汗等をふき、清潔にして使用して下さい。(皮膚が汚れていると、かぶれるおそれがあります)
3. 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、あらかじめ切った絆創膏の小片を半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。また、確認後使用する際は、同じ部位には続けて貼らず、ずらすようにして使用して下さい。
4. 使用后、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師等の専門家に相談して下さい。
5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
6. 小児の手の届かない所に保管して下さい。

お問い合わせ先
第一三共ヘルスケア(株)
お客様相談室
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)