


使用に際してはこの説明文書をよくお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第一三共ヘルスケア・ワコール共同開発

パテックス® 機能性サポーター ハイグレードモデル

ひざのサポート力と動きやすさを追求

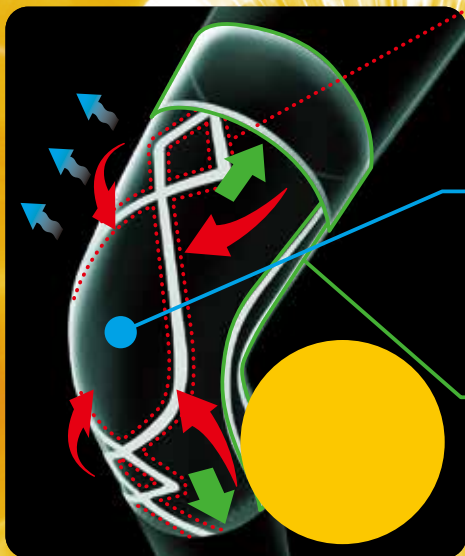

独自のクロスステープ構造

人間工学に基づいたクロスステープ構造でひざ関節を包み込み、左右のふらつきを抑え、ひざの衝撃を緩和します。

薄いストレッチ素材

薄さ約0.7mm^{*}のストレッチ素材で伸縮性に優れ、動きやすさを追求しました。吸汗速乾機能でムレを軽減します。

*本体素材の薄さ

独自のズレ防止機能

裏面の上端部のみならず、サポートラインに沿って縦にもスベリ止めを付けることにより、ズレ防止性能を向上。
*天然ゴム素材は使用していません。

製造番号

お問い合わせ先
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daichi Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10
<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造元 株式会社 ワコール
MADE IN VIETNAM
MADE IN THAILAND



着用上の注意

1. からだに異常を感じた場合は直ちに使用を中止して下さい。
2. ひざ以外には使用しないで下さい。
3. サイズの合わないものは使用しないで下さい。
4. 他の商品との重ねばきや、まくれあがった状態での使用はしないで下さい。
5. 使用する際には、「しゃがむ」「正座する」等の同じ姿勢をとり続けしないで下さい。
6. 就寝中には使用しないで下さい。
7. 着用位置がズレると、適正な機能が得られませんので、注意して下さい。
8. 機能のあらわれ方には個人差があります。



外箱



内袋:PP

登録商標
CW-Xは(株)ワコールの登録商標です。

02

着用方法 デリケートな素材を使用しているため、着脱の際に無理に引っ張ったり爪を立てたりしないで下さい。

① タグを後ろにして、全体を手のひらに寄せてたくし上げのように着用して下さい。



② 爪をたてないように注意しながら少しずつ引き上げていきます。



③ イラストのサポートラインのクロスしている部分がひざ頭(皿)の下の位置に来るように調整します。




④ 脚を伸ばした状態で、たるみがないようによく伸ばして下さい。



サイズの選び方

●イラストのように、ひざ頭の周囲を測って下さい。

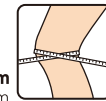

男性用

Mサイズ 34cm~37cm
Lサイズ 36cm~39cm
LLサイズ 38cm~41cm

着脱上の注意

1. 製品の特性上、過度の圧力が部分的に加わると破れ等が発生することがありますので、着脱の際には注意して下さい。
2. 製品の特性上、爪などで引っ掛けると、引きつれたり、糸が引き出してくる場合がありますので、着脱の際には注意して下さい。

保管及び取扱い上の注意

1. 火の近くや高温になる場所に置かないで下さい。
2. 耐久性を損なうことがありますので、品質表示に従って取り扱って下さい。
3. 洗濯する時は、洗濯用ネットに入れて洗濯して下さい。
4. 着用中、摩擦等により他のものに色移りすることがあります。
5. 洗濯中、色落ちすることがありますので、白又は淡色物とは別にして洗って下さい。
6. 着用後又は洗濯後、長時間めれたままにしておくと、他のものに色移りすることがありますので注意して下さい。
7. 乾燥機、アイロン等で強制乾燥はしないで下さい。

品質表示



洗濯ネット使用
ポリエステル、ポリウレタン