


使用に際してはこの説明文書をよくお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第一三共ヘルスケア・ワコール共同開発

パテックス® 機能性サポーター ハイグレードモデル

腰の安定と装着時の快適性を追求

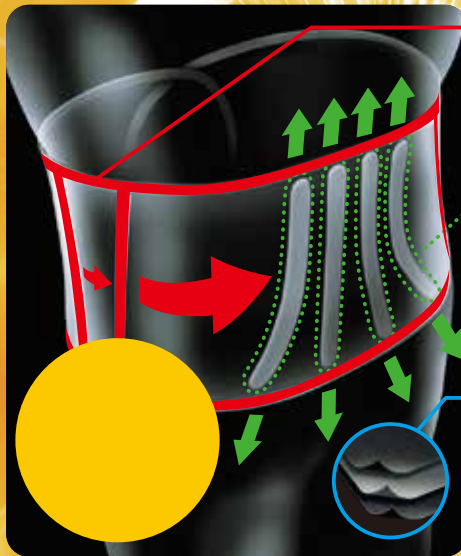

立体3D構造

体の動きを考え、パーツごとに伸びる方向が違う生地を縫い合わせたカットソーで立体3D構造になってます。

4本の樹脂ボーン

内蔵された4本のしなやかな樹脂ボーンが、背骨に沿って腰を面でサポートします。

3層構造パワーネット

内側はやわらかく、外側はしっかりした素材で、腹筋と背筋のバランスをサポートし、腰を安定させ、動きやすくします。

製造番号

お問い合わせ先
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10
<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造元 株式会社ワコール
MADE IN VIETNAM
MADE IN CHINA



着用上の注意

1. からだに異常を感じた場合は直ちに使用を中止して下さい。
2. 腰以外には使用しないで下さい。
3. サイズの合わないものは使用しないで下さい。
4. 肌の敏感な方は、下着の上から着用することをおすすめします。
5. 長時間着用する場合は、適度に着脱を繰り返して下さい。
6. サポーターの内側にカイロを使用しないで下さい。(低温やけどの恐れがあります)
7. 就寝中には使用しないで下さい。
8. 着用位置がズレると、適正な機能が得られませんので、注意して下さい。
9. 機能の表れ方には個人差があります。



外箱



内袋:PP

® 登録商標

CW-Xは(株)ワコールの登録商標です。

04

着用方法

① 腰に巻いた時、CW-Xのタグが外側

樹脂ボーンが広がっている方が下方向
内側外側・上下を確認します。

②

CW-Xタグが、右側外面になるように持ち、両手で引っ張って左右均等の長さになるようにします。

③

背部の樹脂ボーンが背骨を中心に左右対称になるように合わせてから、ベルトの上辺がウエストラインにくるように高さを決め、面ファスナーをまっすぐにとめます。(前あわせは水平に着用して下さい)

サイズの選び方

●イラストのように、ウエスト囲を測って下さい。



男性用

Mサイズ 76cm~84cm
Lサイズ 84cm~94cm

保管及び取扱い上の注意

1. 火の近くや高温になる場所に置かないで下さい。2. 耐久性を損なうことがありますので、品質表示に従って取り扱って下さい。3. この製品は樹脂ボーンを使用していますので、洗濯は手洗いにて行い、脱水機を使用せず、絞らずにタオルで水気を取り、形を整えて日陰で乾かして下さい。4. 着用中、摩擦等により他のものに色移りすることがあります。5. 洗濯中、色落ちすることがありますので、白又は淡色物とは別にして洗って下さい。6. 着用後又は洗濯後、長時間めれたままにしておくと、他のものに色移りすることがありますので注意して下さい。7. 乾燥機、アイロン等で強制乾燥はしないで下さい。8. この製品は面ファスナーを使用しているため、面ファスナーが他のものを傷つける場合があります。取扱いには十分注意して下さい。9. 生地の性質上シワになりやすいため、面ファスナーをとめた状態で保管して下さい。

品質表示



面ファスナーは留め、手洗い洗濯
ポリエステル、ポリウレタン