

ゴム製ではなく、  
ポリウレタン素材を  
使用した製品です。



# 0.02<sup>薄さ!</sup> ミリ<sup>※</sup>

## SUNSEA<sup>®</sup> NON-RUBBER 002

サンシー ノンラバー 002

regular size (レギュラーサイズ)

large size (ゆったりフィット Lサイズ)

管理医療機器 (男性向け避妊用コンドーム)

[取扱説明書] ご使用前に必ずお読み下さい

※製造販売元測定



### ZEROスタイル!

# この薄さ新感覚!0.02 ミリ<sup>※</sup>

## 薄くて丈夫。しかもなめらかでやわらかフィット

サンシー ノンラバー 002 は、強度や耐久性、生体適合性に優れたポリウレタンを素材としています。

また、熱可塑性に優れた素材ですので、体温に近づくとつれ、やわらかくフィットする特性を持っています。

薄さ、強度、ゴム臭、熱伝導性など、今までのゴム製コンドームとは全く違う自然な使用感を実現しました。


レギュラーサイズとLサイズがあります。

※製造販売元測定

## サンシー<sup>®</sup>ノンラバー002 製品ラインナップ

### レギュラーサイズ

[販売名: サンシー ノンラバー ゼロゼロツー]

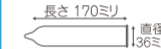

- 素材…… ポリウレタン
- 型…… スタンダード
- 色…… 無色透明
- 滑らかな使用感が得られる潤滑剤付




6個入



12個入

### ゆったりフィット(L サイズ)

[販売名: サンシー ノンラバー ゼロゼロツー ゆったりフィット]

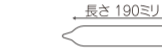

- 素材…… ポリウレタン
- 型…… スタンダード
- 色…… 無色透明
- 滑らかな使用感が得られる潤滑剤付



6個入



12個入

〈お問い合わせ先〉 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
電話 03(5205)8331  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

〈ホームページアドレス〉 <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



### 第一三共ヘルスケア

Daiichi-Sankyo

©登録商標

## サンシーノンラバー002の特長

- 1 薄さ**  
0.02ミリ※の薄さを実現しています。 ※製造販売元測定
- 2 ゴム臭がありません**  
ポリウレタンを素材としていますので、ゴム特有のにおいがありません。
- 3 熱伝導性**  
肌のぬくもりを瞬時に伝え、挿入時の違和感を軽減し、自然な使用感が得られます。

- 4 なめらかさ**  
結合性の高い高分子がなめらかな表面を実現しています。
- 5 天然ゴムアレルギーの心配がありません**  
ポリウレタン素材を使用していますので、天然ゴムによるアレルギーの心配はありません。
- 6 透明感**  
透明感に優れているため、視覚的にも自然です。
- 7 長い製品寿命**  
物性が安定している素材なので、10年間の使用期限を保証しています。

### ●装着方法

1 本品は性器接触前にペニスが勃起状態になってから、ペニスに装着して下さい。

2 本品は使用直前に包装の先端を折り、引き上げて取り出して下さい。このとき本品に、キズを付けないで下さい。

3 本品には表裏があります。表裏をよく見てから龟头の上に置きます。この際、空気を抱きこまないように、


本品の先端の精液溜まり部分を軽く押さえて下さい。



4 本品を、ゆっくりと両手の指でペニスの根元に向かってころがしながら、根元までかぶせて下さい。この際、表裏を間違えると装着できません。

5 射精後は、すみやかに本品を押さえながら、ゆっくりと膣外へ抜き出して下さい。

6 使用した本品は水洗トイレに流さず、各自治体の処分方法に従って下さい。

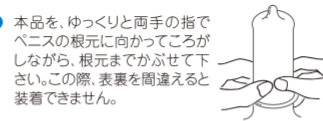

コンドームの適正な使用は、避妊に効果があり、エイズ(AIDS)を含む他の多くの性感染症に感染する危険を減少しますが、100%の効果を保証するものではありません。

### ●使用上の注意

- 1 本品の使用は、1個につき1回限りです。その都度、新しいコンドームをご使用下さい。
- 2 本品には爪や歯、その他硬いものに強く触れないようにして下さい。その時のキズが使用中破れの原因となります。
- 3 本品は使用する人によって、まれにアレルギー症状を起こすことがあります。アレルギー症状が起きた時は、使用を中止し医師に相談して下さい。
- 4 本品は男性のペニスに装着し、女性の膣内に挿入する性行為に適用するよう設計されています。これ以外の使用は破れる危険があります。
- 5 エイズ(AIDS)を含む性感染症は、接触感染ですので本品は必ず性器接触の前に装着して下さい。避妊を目的とする場合でも、はじめから装着して下さい。精子は射精時のみならず、射精前後でも流出します。引き続き性行為を行う時は、特にご注意下さい。
- 6 本品には通常より多めの潤滑剤が塗布されていますので、他のクリーム及びオイル等は使わないようにして下さい。
- 7 使用期限を過ぎた本品は破れる危険がありますので使用しないで下さい。

○ Lサイズ商品は、レギュラーサイズに比べサイズを大きくしてありますので、ご使用になる方によっては性行為中に抜け落ちてしまう可能性があります。もし装着時や使用中に「大きい」、「抜けそう」と感じられましたら、すぐに使用を中止して下さい。

### ●保管上の注意

1. 下記の場所に保管しないで下さい。
  - 1) 直射日光のあたる場所
  - 2) 高温多湿の場所
  - 3) 防虫剤などの揮発性物質のある場所
2. 購入時の包装に入れたまま保管し、その都度、取り出して下さい。個別包装のまま携帯しないで下さい。

製造 相模ゴム工業株式会社

販売元 神奈川県厚木市元町2-1

電話 046-221-2311

製造元 サガミマニファクチャラーズ パツガジャ工場(マレーシア)

(Sagami Manufacturers Sdn.Bhd. Batu Gajah Factory)

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10